



## Familiarícese con su inyector corporal y cartucho precargado SKYRIZI® (risankizumab-rzaa)

### Inyector corporal

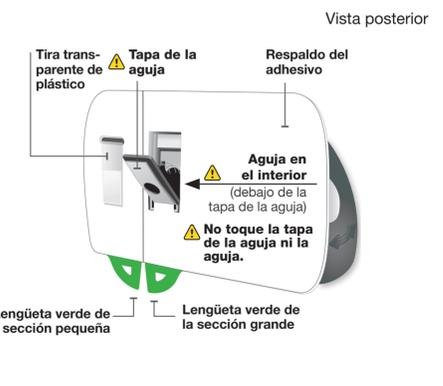

### Cartucho precargado

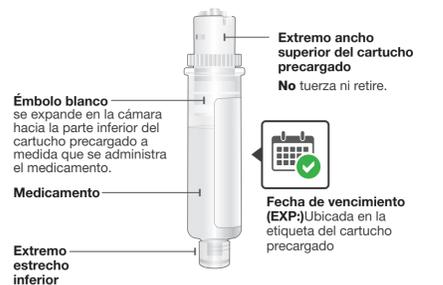


## Paso 1 Prepárese

Antes de usar SKYRIZI, debe recibir capacitación sobre cómo inyectar SKYRIZI® (risankizumab-rzaa).



### 1A Compruebe la fecha de vencimiento

- Saque la caja del refrigerador.
- Compruebe la fecha de vencimiento (EXP.) en la caja.
- **No** use SKYRIZI si la fecha de vencimiento (EXP.) ya pasó.

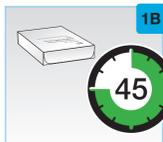

### 1B Espere al menos 45 minutos

- Deje la caja sin abrir a temperatura ambiente para que se atempere.
- Manténgala fuera de la luz solar directa.
- Espere un mínimo de 45 minutos y hasta un máximo de 90 minutos para permitir que SKYRIZI alcance la temperatura ambiente.
  - El inyector corporal no funcionará si se deja a temperatura ambiente durante menos de 45 minutos.
- **No** atempere SKYRIZI de ninguna otra manera (por ejemplo, **no** lo caliente en un horno de microondas ni en agua caliente).




### 1C Abra la caja y saque la bandeja de plástico

- Levante la lengüeta lateral de la caja.
- Saque la bandeja de plástico.



### 1D Reúna todos los materiales y lávese las manos

- Coloque los siguientes elementos en una superficie limpia:
  - bandeja de plástico con el inyector corporal y el cartucho precargado (incluidos)
  - 2 toallitas con alcohol (no incluidas)
  - una bolita de algodón o una gasa (no incluidas)
- recipiente para objetos punzocortantes (no incluido) (consulte "Eliminación de SKYRIZI")
- Lávese las manos y séquelas.

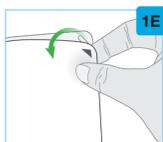

### 1E Retire el sello de papel blanco de la bandeja

- Ubique la flecha negra.
- Desprendá de la bandeja de plástico el sello de papel blanco de la bandeja.
- **No** use el inyector corporal ni el cartucho precargado si el sello de papel blanco de la bandeja no está presente o está dañado, y devuélvala a la farmacia.



### 1F Levante la cubierta de plástico

- Ubique la abertura redondeada en la cubierta superior.
- Inserte el dedo índice en la abertura y coloque el pulgar en el lado opuesto.
- Levante la cubierta para quitarla y déjela a un lado.



### 1G Inspeccione el inyector corporal

- Compruebe que el inyector corporal esté intacto y no esté dañado.
- **No** cierre la puerta gris antes de que el cartucho precargado esté colocado.
- La puerta gris debe estar entreabierta.
- Si la puerta gris no se abre, presione con firmeza en los bordes de la misma (en el lado izquierdo de la puerta) y haga girar la puerta para abrirla.
- **No** utilice el inyector corporal si se ha dejado caer, si se descubre que faltan piezas o si está dañado.
- **No** permita que el inyector corporal se moje con agua ni ningún otro líquido.
- **No** toque el botón de inicio gris hasta que sea el momento de inyectar. Solo puede presionarse una vez.
- Si el botón de inicio gris se presiona antes de que el inyector corporal se coloque en el cuerpo, el inyector ya no podrá usarse. Llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494.
- **No** toque la tapa de la aguja ni la aguja.



**Aguja en el interior**  
(debajo de la tapa de la aguja)

- Continúe con **Prepare el inyector corporal.**

## Paso 2 Prepare el inyector corporal



### 2A Abra completamente la puerta gris

- **No** toque la tapa de la aguja ni la aguja, situada en los bordes de la misma (en el lado izquierdo de la parte posterior de la tapa de la aguja).
- Haga girar la puerta gris completamente hacia la derecha para abrirla.
- Si la puerta gris no se abre, presione con firmeza en los bordes de la misma (en el lado izquierdo de la puerta) y haga girar la puerta para abrirla.
- **No** cierre la puerta gris antes de que el cartucho precargado esté colocado.
- **No** toque la tapa de la aguja ni la aguja.
- Ponga el inyector corporal a un lado.



### 2B Inspeccione el cartucho precargado

- Retire cuidadosamente el cartucho precargado de la bandeja de plástico.
- **No** tuerza ni retire la parte superior del cartucho.
- Revise el cartucho precargado para asegurarse de lo siguiente:
  - Que no haya pasado la fecha de vencimiento (EXP.).
  - El líquido debe lucir de claro a amarillo y puede tener pequeñas partículas blancas o transparentes. Es normal que haya una o más burbujas de aire.
  - Las partes del cartucho precargado parezcan estar intactas y el plástico transparente no esté agrietado ni roto.
- **No** utilice si la fecha de vencimiento (EXP.) ya pasó.
- **No** utilice si el líquido tiene un aspecto turbio, si ha cambiado de color o si contiene escamas o partículas grandes.
- **No** utilice si el líquido ha estado congelado (aunque se haya descongelado).
- **No** utilice el cartucho precargado si se ha dejado caer, si se descubre que faltan piezas o si está dañado.




### 2C Limpie el extremo estrecho inferior del cartucho precargado

- Ubique el extremo estrecho inferior del cartucho precargado.
- Limpie el extremo estrecho inferior del cartucho precargado con una toallita impregnada en alcohol. Asegúrese de usar la toallita impregnada en alcohol para limpiar el centro del extremo estrecho inferior del cartucho precargado.
- **No** toque el extremo estrecho inferior del cartucho precargado después de limpiarlo.



### 2D Coloque el cartucho precargado limpio en el inyector corporal

- **No** tuerza ni retire la parte superior del cartucho precargado.
- Inserte primero el extremo estrecho inferior del cartucho precargado en el inyector corporal.
- Empuje firmemente la parte superior del cartucho precargado hasta oír un "clic".
- Luego de colocar el cartucho precargado, podría ver algunas gotas de medicamento en la parte posterior del inyector corporal. Es normal.

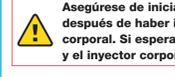

**Asegúrese de iniciar la inyección en un plazo de 5 minutos después de haber insertado el cartucho precargado en el inyector corporal. Si espera demasiado tiempo, se secará el medicamento y el inyector corporal no funcionará posteriormente.**




### 2E Cierre la puerta gris

- Gire la puerta gris hacia la izquierda y, luego, apriete firmemente hasta oír un chasquido que indique que la puerta se ha cerrado y ha encajado en su lugar.
- La puerta gris debe permanecer trabada después de colocar el cartucho precargado.
- **No** cierre la puerta gris si el cartucho precargado no está insertado completamente o si falta.
- Proceda sin demora a **Prepárese para inyectar**

## Paso 3 Prepárese para inyectar

Mantenga los dispositivos electrónicos, incluidos los teléfonos celulares, a un mínimo de 12 pulgadas (30 cm) del inyector corporal hasta que se haya terminado de administrar la inyección

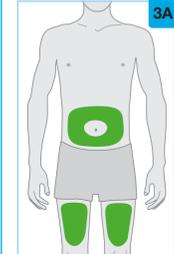

### 3A Elija el área de inyección

- Ubique una zona firme y plana de la piel. Asegúrese de que ninguna prenda obstruya el área:
  - El abdomen (vientre), a una distancia de al menos 2 pulgadas del ombligo.
  - La parte delantera del muslo izquierdo o derecho.
- **No** inyecte en áreas de la piel con pliegues o bultos naturales, ya que el inyector corporal podría caerse mientras lo lleva puesto.
- **No** inyecte en zonas de la piel adoloridas, amarradas, enrojecidas, endurecidas, cicatrizadas, o con estrías, lunares o vello excesivo. Puede recortarse el vello excesivo del área de inyección.



### 3B Limpie el área de inyección

- Limpie el área de inyección con una toallita con alcohol.
- Permita que el área de inyección se seque completamente.
- **No** toque el área de inyección ya limpiada antes de colocar el inyector corporal sobre la piel.



### 3C Desprenda ambas lengüetas para exponer el adhesivo

- Voltee el inyector corporal para ubicar las dos lengüetas verdes.
- **No** toque la tapa de la aguja (la aguja está en el interior).
- Desprenda la sección grande tirando de la lengüeta verde para exponer el adhesivo.
- Desprenda la sección pequeña tirando de la lengüeta verde para exponer el adhesivo. Esto retirará la tira transparente de plástico y activará el inyector corporal.
- **No** desprenda el material adhesivo del inyector corporal ni permita que la cara adhesiva se pliegue y se adhiera a sí misma.




- Revise la luz de estado cuando oiga una señal sonora del inyector corporal.
- La luz de estado parpadeará en azul cuando el inyector corporal se active.
- Si la luz de estado no parpadea en azul, llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494.
- **No** presione el botón de inicio gris todavía.
- **No** toque la tapa de la aguja ni la aguja.

**Si la luz de estado parpadea en rojo y se emite una señal sonora, el inyector corporal no está funcionando correctamente. No continúe usándolo.**



Llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494 para obtener ayuda. Si el inyector corporal está instalado en el cuerpo, retírelo cuidadosamente de la piel.

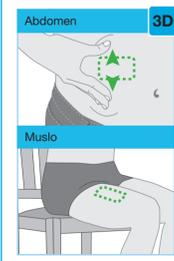

### 3D Prepare el inyector corporal para la colocación

- En el caso del abdomen, estire y sujete la piel para formar una superficie firme y plana para la inyección, a una distancia de al menos 2 pulgadas del ombligo. Asegúrese de ajustar su postura (siéntese derecho) para evitar que se formen pliegues y bultos en la piel.
- No es necesario estirar la piel para que quede plana si se utiliza la parte delantera del muslo izquierdo o derecho.
- Asegúrese de colocar el inyector corporal de manera tal que pueda ver la luz de estado azul.



### 3E Coloque el inyector corporal sobre la piel

- Cuando la luz azul parpadee, el inyector corporal estará listo. Coloque el inyector corporal sobre la zona limpia de la piel con la luz de estado visible.
- **No** coloque el inyector corporal encima de la ropa. Colóquelo solo directamente sobre la piel.
- Pase el dedo sobre el material adhesivo para fijarlo. Asegúrese de que todo el adhesivo esté adherido a la piel.
- **No** mueva ni ajuste el inyector corporal después de que se haya colocado sobre la piel.
- Cuando el inyector corporal esté colocado sobre la piel, continúe con **Inyecte el medicamento**

## Paso 4 Inyecte el medicamento




### 4A Inicie la inyección

- Presione firmemente el botón de inicio gris hasta oír un clic y, luego, suéltelo.
- **No** toque el botón de inicio gris hasta haber colocado el inyector corporal con el cartucho precargado instalado sobre la piel y esté listo para inyectar. Solo puede presionar el botón de inicio 1 vez.
- Podría sentir un pinchazo.
- Revise la luz de estado cuando oiga una señal sonora del inyector corporal.
- Después del inicio de la inyección, la luz de estado parpadeará continuamente en verde.
- Oír ruidos de bombeo mientras el inyector corporal administra el medicamento.
- **No** siga usando el inyector corporal si la luz de estado parpadea en rojo y el inyector emite una señal sonora. Retírelo cuidadosamente de la piel si la luz de estado parpadea en rojo. Llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494.




### 4B Espere a que termine la inyección

- La administración de toda la dosis de medicamento podría tomar hasta 5 minutos. El inyector corporal se detendrá automáticamente cuando termine la inyección. Durante la inyección:
  - la luz de estado continuará parpadeando en verde.
  - oír ruidos de bombeo mientras el inyector corporal continúe administrando el medicamento.
  - pueden hacerse actividades físicas moderadas como caminar, alcanzar objetos y agacharse.
- **No** siga usando el inyector corporal si la luz de estado parpadea en rojo y el inyector emite una señal sonora. Retírelo cuidadosamente de la piel si la luz de estado parpadea en rojo y el inyector emite una señal sonora. Llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494.

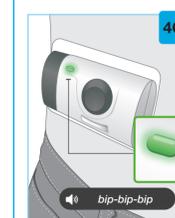

### 4C La inyección ha terminado

- El inyector corporal se detendrá automáticamente.
- Cuando termine la inyección, oír una señal sonora y la luz de estado cambiará a verde fijo. Revise la luz de estado. Si ha cambiado a verde fijo, significa que la inyección ha terminado.
- Cuando la inyección termine, continúe con el paso siguiente.

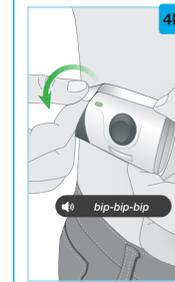


### 4D Retire el inyector corporal

- **No** coloque los dedos en el lado posterior del inyector corporal cuando lo retire de la piel.
- Cuando haya terminado la inyección, agarre la esquina del adhesivo para desprender cuidadosamente el inyector corporal de la piel.
- **No** toque la tapa de la aguja ni la aguja, situada en la parte posterior del inyector corporal.
- Después de retirar el inyector corporal, oír varias señales sonoras y se apagará la luz de estado.
- La tapa de la aguja cubrirá la aguja cuando el inyector corporal se retire de la piel.
- Es normal que haya algunas gotas pequeñas de líquido en la piel después de retirar el inyector corporal. Si observa más de unas pocas gotas pequeñas de líquido en la piel, llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494.
- Presione una bolita de algodón o una gasa sobre el lugar de inyección en la piel durante 10 segundos.
- **No** frote el lugar de inyección.
- Es normal que haya un sangrado leve en el lugar de inyección.

- Continúe con **Confirme y deseche**

## Paso 5 Confirme y deseche

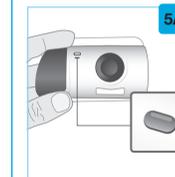

### 5A Revise el inyector corporal

- Inspeccione el visor del medicamento y la luz de estado.
- Verifique que el émbolo blanco usado abarque todo el visor del medicamento y que se apague la luz verde fija, lo que indicará que todo el medicamento se ha inyectado.
- **Si** el émbolo blanco usado no abarca todo el visor, llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494.




### 5B Coloque el inyector corporal usado en un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la FDA inmediatamente después de usarlo

- Deje el cartucho precargado en el inyector corporal.
- **No** deseche el inyector corporal usado en la basura de su casa.
- Para obtener más información, consulte la sección "Eliminación de SKYRIZI".

### Leyenda de símbolos

	Precaución	Estar alerta o vigilar con atención
	Luz parpadeando en azul	Encendido/Lista
	Luz parpadeando en verde	Ha comenzado la inyección
	Luz verde fija	La inyección ha terminado
	Ninguna luz	Apagado/Terminado
	Luz parpadeando en rojo	<b>No</b> continúe usando el inyector corporal. No está funcionando correctamente. Llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494 para obtener más información.

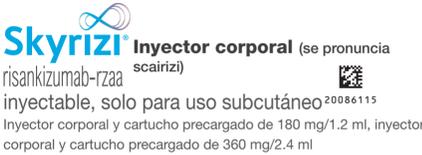

Lea estas Instrucciones de uso antes de administrar SKYRIZI y cada vez que surta su receta. Podría haber información nueva. Esta información no sustituye a la consulta con su profesional de la salud sobre su estado de salud o tratamiento.

Consulte en la Guía del medicamento de SKYRIZI® (risankizumab-rzaa) la información sobre el producto. Si necesita ayuda, llame a su profesional de la salud, llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494, o visite SKYRIZI.com.

Fabricado por: AbbVie Inc. North Chicago, IL 60064, EE. UU. Número de licencia en EE. UU.: 1889 SKYRIZI® es una marca comercial registrada de AbbVie Biotechnology Ltd. © 2024 AbbVie Inc. Estas Instrucciones de uso han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos. Revisado: 6/2024

Ref.: 20086115 LAB-11557 ENGLISH MASTER LAB-11766 SPANISH MASTER



**Información importante que debe saber antes de inyectar SKYRIZI**

- Reciba capacitación sobre cómo inyectar SKYRIZI antes de aplicar la inyección.
- **No** agite la caja de SKYRIZI, el inyector corporal ni el cartucho precargado.
- **No** saque de la caja el inyector corporal ni el cartucho precargado hasta que esté listo para inyectar.
- **No** espere más de 5 minutos para comenzar la inyección después de colocar el cartucho precargado limpio en el inyector corporal. Si espera demasiado tiempo, se secará el medicamento y el inyector corporal no funcionará posteriormente.
- **No** toque el botón de inicio hasta que haya colocado el inyector corporal con el cartucho precargado sobre su piel y esté listo para inyectar.
  - o Solo puede presionar el botón de inicio 1 vez.
- **No** use el inyector corporal ni el cartucho precargado si se han dejado caer o si están dañados.
- **No** reutilice el inyector corporal ni el cartucho precargado. El inyector corporal y el cartucho precargado deben usarse solo una vez (dosis única).
- **No** permita que el inyector corporal se moje con agua ni ningún otro líquido.
- El inyector corporal de dosis única está diseñado para usarse exclusivamente con el cartucho precargado de SKYRIZI.
- Debe limitarse la actividad física durante el proceso de inyección. Pueden hacerse actividades físicas moderadas como caminar, alcanzar objetos y agacharse.
- **No** use SKYRIZI si la fecha de vencimiento (EXP.) ya pasó.
- **No** use el cartucho precargado si el líquido cambió de **color**, tiene un aspecto **turbio** o si contiene **escamas o partículas grandes**. El líquido debe tener un aspecto de transparente a amarillo y puede tener pequeñas partículas blancas o transparentes.
- El inyector corporal y el cartucho precargado no están elaborados con látex de caucho natural.
- Mantenga SKYRIZI y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

**Conservación y preparación para el uso**

- Conservar SKYRIZI en la caja original para protegerlo de la luz y de daños físicos hasta que sea el momento de usarlo.
- Conservar SKYRIZI en el refrigerador a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C (36 °F y 46 °F).
- Cuando esté listo para usarlo, saque la caja del refrigerador y déjela a temperatura ambiente durante un mínimo de 45 minutos y un máximo de 90 minutos para permitir que SKYRIZI se atempere.
  - o El inyector corporal no funcionará si se deja a **temperatura ambiente** durante menos de **45 minutos**.
- **No** lo deje bajo la luz solar directa.
- **No** saque de la caja el inyector corporal ni el cartucho precargado mientras deja que SKYRIZI alcance la temperatura ambiente.
- **No** caliente SKYRIZI de ninguna otra manera. Por ejemplo, **no** lo caliente en un horno de microondas ni en agua caliente.
- **No** lo utilice si el líquido ha estado congelado (aunque se haya descongelado).
- **No** use SKYRIZI si las perforaciones de la caja están rotas. Devuelva el producto a la farmacia.
- **No** use el inyector corporal ni el cartucho precargado si el sello de papel blanco de la bandeja no está presente o está dañado, y devuelva la caja a la farmacia.

**Información adicional**

- Parte aplicada de tipo BF.
- Inyector corporal esterilizado con óxido de etileno.
- El intervalo de altitud es: -1,312 pies a 10,499 pies (-400 metros a 3,200 metros).

**Compatibilidad electromagnética (EMC) del inyector corporal**

El inyector corporal está concebido para usarse en el hogar o en un entorno médico profesional, y cumple las normas ISO 11608-1:2014 e IEC 60601-1-2:2014.

Hay que asegurarse de utilizar el inyector corporal según los siguientes límites y factores ambientales concretos para evitar que se vea afectado adversamente el desempeño (dosis faltantes o incompletas de SKYRIZI® [risankizumab-rzaa]).

- Mantenga los dispositivos electrónicos, incluidos los teléfonos celulares, a un mínimo de 12 pulgadas (30 cm) del inyector corporal hasta que se haya terminado de administrar la inyección. Se desconoce el posible efecto de la interferencia electrónica cuando el inyector corporal se utiliza a una distancia de menos de 12 pulgadas (30 cm) de los dispositivos.
- No exponga el inyector corporal a un entorno en el que se utilicen sistemas de resonancia magnética (RM) (por ejemplo, para imagenología por RM).
- Si se utiliza cerca de otros equipos eléctricos, observe el inyector corporal y los otros equipos para asegurarse de que estén funcionando correctamente.

Emisiones	
Nombre de la prueba de emisiones	Niveles de prueba
Campos electromagnéticos de radiofrecuencia radiada	Según CISPR 11, de clase B

Inmunidad electromagnética	
Nombre de la prueba	Niveles de prueba
Descarga electrostática (ESD)	Contacto de ±8 kV ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV y ±15 kV en el aire
Campo electromagnético de radiofrecuencia	10 V/m 80 MHz–2.7 GHz
Campo magnético de la frecuencia de alimentación de 50 Hz	30 A/m

La inmunidad del puerto de la carcasa a los equipos de radiofrecuencia de comunicaciones inalámbricas cumple el IEC 60601-1-2:2014.

**Explicación de símbolos**

Símbolo	Descripción
	Mantener seco
	Esterilizado con óxido de etileno
	No reutilizar
	No utilizar si el envase está dañado y consultar las Instrucciones de uso
	Fecha de fabricación
	Código de lote
	Número de catálogo
	Número de serie
	Consultar el manual/folleto de instrucciones
	Parte aplicada de tipo BF
	No es seguro para RM

**Preguntas frecuentes**

**P. ¿Qué sucede si no puedo abrir la puerta del inyector corporal para insertar el cartucho precargado?**  
**R.** Para abrir la puerta del inyector corporal, presione firmemente el lado derecho de la puerta para liberar el pestillo. Si sigue sin poder abrir la puerta, llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494.

**P. ¿Qué sucede si presiono el botón de inicio gris antes de colocar el inyector corporal sobre la piel?**  
**R.** El botón de inicio gris solo se puede presionar una vez. Si el botón de inicio gris se presiona antes de que el inyector corporal se coloque en el cuerpo, el inyector ya no podrá usarse. Llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494.

**P. ¿Qué sucede si el inyector corporal no emite un sonido y la luz de estado azul no parpadea cuando retiro las lengüetas verdes?**  
**R.** Al desprender la lengüeta verde pequeña, se retira la tira transparente de plástico y eso activa el inyector corporal. Si se ha retirado todo el papel adhesivo y el inyector corporal no se enciende, llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494.

**P. ¿Qué sucede si presiono el botón de inicio según las indicaciones después de colocar el inyector corporal sobre la piel y la luz permanece azul?**  
**R.** Vuelva a presionar firmemente el botón de inicio gris. Si la luz de estado permanece azul o parpadea en rojo, retire el inyector corporal desprendiéndolo cuidadosamente de la piel. No vuelva a colocarlo el inyector corporal. Llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494.

**P. ¿Qué sucede si la luz de estado parpadea en rojo y se emite un sonido mientras llevo puesto el inyector corporal?**  
**R.** Si la luz de estado parpadea continuamente en rojo y se emite un sonido, no use el inyector corporal. Si lo tiene colocado en el cuerpo, retírelo cuidadosamente. Llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494.

**P. ¿Qué debo hacer si el inyector corporal se desprende de mi cuerpo durante la inyección?**  
**R.** El inyector corporal con el cartucho precargado ya no podrá usarse. No vuelva a colocarlo en su cuerpo. Llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494.

**P. ¿Cómo puedo darme cuenta de que la inyección se ha completado?**  
**R.** La inyección se ha completado cuando el inyector corporal emite una señal sonora, el émbolo blanco abarca todo el visor del medicamento y la luz de estado deja de parpadear en verde y se pone verde fija.

**P. ¿Qué debo hacer si hay más de unas pocas gotas de líquido en el área de inyección?**  
**R.** Llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494 para obtener ayuda.

**P. ¿Qué debo hacer con el inyector corporal usado después de la inyección?**  
**R.** Deseche el inyector corporal usado en un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la FDA y no en la basura de su casa. Puede recibir un recipiente para objetos punzocortantes para desechar SKYRIZI® (risankizumab-rzaa) sin ningún costo adicional visitando [www.SKYRIZI.com](http://www.SKYRIZI.com) o llamando al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494.

**P. ¿Qué hago si no he recibido capacitación en persona de un profesional de la salud?**  
**R.** Si necesita ayuda, llame a su profesional de la salud o al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494. **Reciba** capacitación sobre cómo inyectar **SKYRIZI** antes de administrar las inyecciones.

**Si la luz de estado parpadea en rojo y se emite una señal sonora, el inyector corporal no está funcionando correctamente. No continúe usándolo.**

Llame al (866) SKYRIZI o al (866) 759-7494 para obtener ayuda. Si el inyector corporal está instalado en el cuerpo, retírelo cuidadosamente de la piel.

*bip-bip-bip-bip-bip*

**Eliminación de SKYRIZI**

- Coloque SKYRIZI en un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la FDA inmediatamente después de usarlo. No deseche SKYRIZI en la basura de su casa.
- Si no cuenta con un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la FDA, puede usar un recipiente de uso doméstico que:
  - o esté hecho de plástico muy resistente;
  - o pueda cerrarse con una tapa ajustada resistente a las perforaciones y que no permita que salgan los objetos punzocortantes;
  - o pueda colocarse verticalmente y sea estable durante el uso;
  - o sea resistente a las fugas; y
  - o esté etiquetado correctamente para advertir que contiene desechos peligrosos.

Cuando el recipiente para objetos punzocortantes esté casi lleno, deberá seguir las directrices de su comunidad en cuanto a la forma correcta de desecharlo. Podría haber leyes estatales o locales que rigieran la forma en que deben desecharse las agujas y jeringas usadas.

Para obtener más información acerca del desecho seguro de objetos punzocortantes en el estado en el que usted vive, visite el sitio web de la FDA: [www.fda.gov/safesharpsdisposal](http://www.fda.gov/safesharpsdisposal).

**No** recicle los recipientes para objetos punzocortantes usados.

**DO NOT RE-SIZE**  
**Ad unit Project # must match this project # LAB-11766**

20086115 Mfrg. P.I. for  
 PPD Advertising

Colores:			
PMS 2995 C	Ámbar		